

Wat zeggen anderen?

"Ik ben met het vrouwencondoom begonnen toen ik moest stoppen met de pil omdat ik daar migraine van kreeg. Bovendien beschermt de pil niet tegen SOA's. Dat doet het vrouwencondoom wél en dat vind ik een veilig idee. In het begin moest ik eventjes oefenen, maar na een paar keer ging het zonder moeite. Het is niet lastiger dan een mannencondoom. Het voelt heel zacht en comfortabel aan: het is eigenlijk net als vrijen zonder condoom."

Annelies Drijvers (29)

"Als ik een avondje ga stappen, neem ik mijn eigen geld mee, zodat ik niet van anderen afhankelijk ben. Met het vrouwencondoom werkt dat precies hetzelfde: ik neem de verantwoordelijkheid over mijn eigen lichaam en wil mezelf kunnen beschermen tegen geslachtsziektes of een ongewenste zwangerschap. Zeker bij wisselende contacten vind ik het belangrijk om je lot niet in handen van de ander te leggen."

The Female Health Company

Aan het begin van dit nieuwe millenium werd FEMIDOM geïntroduceerd en gaf daarmee aan dat de tijden veranderd zijn en de discriminatie van de vrouw op seksueel gebied een heel eind achter ons ligt. Het vrouwencondoom is het enige beschikbare middel dat vrouwen zelf kunnen gebruiken, wat zowel beschermt tegen zwangerschap als tegen HIV en andere SOA's. Het geeft vrouwen wereldwijd het recht om hun lichaam te beschermen. Het Engelse bedrijf, dat FEMIDOM heeft ontwikkeld, heet niet voor niets The Female Health Company. Zij leveren dit product inmiddels aan meer dan 110 landen. Waarbij vooral in Afrika samenwerking is gezocht met regeringen vanwege de enorme HIV/AIDS-problematiek.

Aandachtspunten

- Breng het vrouwencondoom in voordat je begint te vrijen
- Let erop dat scherpe nagels of ringen het condoom niet scheuren als je hem inbrengt
- Het vrouwencondoom gaat tijdens het vrijen schuiven. Let erop dat hij toch op zijn plaats blijft. Normaal gesproken zorgt de bovenste, kleine ring daarvoor
- Let erop dat het vrouwencondoom goed zit: dat is zo als de binnenring net voorbij het schaambeen ligt
- Het gebruik is even wennen, probeer het daarom minstens driemaal uit.

Condoom voor vrouwen



femidom®

Product: Femidom, condoom voor vrouwen
Artikelnummer: 930100
Z-Index nummer: 14208547 (bestelnr. bij apotheken)
EAN code: 5022213020021

Distributeur Nederland: Trophax B.V. – Postbus 134 – 3330 AC Zwijndrecht (NL)

Kijk voor algemene informatie: www.trophax.nl
Meer info? Mail: info@trophax.nl
of bel: +31(0)78 - 610 57 27

Producent: The Female Health Company
London (UK)

femidom®

FDA U.S. Food and Drug Administration

Het FEMIDOM vrouwencondoom

Het FEMIDOM vrouwencondoom is veilig, betrouwbaar, eenvoudig in gebruik en er is geen doktersbezoek voor nodig. Wanneer het vrouwencondoom volgens de instructies wordt gebruikt, biedt het voor 95 % bescherming tegen zwangerschap en seksueel overdraagbare aandoeningen (SOA's) waaronder HIV.

Wat is FEMIDOM ?

Het FEMIDOM vrouwencondoom is een doorzichtig rubber zakje van 17 cm lang dat je in de vagina plaatst, net als een tampon. Het vrouwencondoom heeft aan de boven- en onderkant een ring. De grote buitenring heeft een doorsnee van 7 cm, de kleine binnenring is ongeveer 3 cm doorsnee.

De binnenring en het grootste gedeelte van het zakje zit in de vagina en de buitenring bedekt de schaamlippen. Daardoor komt de penis niet in aanraking met de vaginawand of de schaamlippen.



Voor wie is FEMIDOM ?

Voor vrouwen

- die de anticonceptie in eigen hand willen houden
- die niet altijd op een vast tijdstip aan anticonceptie willen denken
- die alleen aan anticonceptie willen denken als ze gaan vrijen
- die zich willen beschermen tegen geslachtsziektes

Hoe werkt FEMIDOM ?

Het FEMIDOM vrouwencondoom vangt het sperma op, zodat dit niet in contact komt met het lichaam van de vrouw. Het sperma kan de baarmoeder dus niet bereiken. Hierdoor wordt een zwangerschap voorkomen.

Waar koop je FEMIDOM ?

Bij apotheek, drogist of via internet.

Voordelen FEMIDOM

- Je kunt hem op elk moment vóór het vrijen inbrengen
- De penis van de man zit niet beknelde
- De man hoeft zich niet direct na zaadlozing terug te trekken
- Je hoeft hem niet direct na het vrijen te verwijderen

- Het vrouwencondoom kan niet afglijden
- Het vrouwencondoom is sterk, waardoor het scheurrisico klein is
- Beschermt beide partners tegen overdracht van ziektes aan de geslachtsdelen (ook tegen herpes en genitale wratten)
- Je blijft steeds vruchtbaar tijdens het gebruik
- Je houdt je eigen, normale menstruatiecyclus
- Je hoeft er niet voor langs de huisarts
- Het vrouwencondoom beschermt direct tegen zwangerschap

Vragen en antwoorden

Is FEMIDOM te voelen als het is ingebracht?

Nee. Als de instructies nauwkeurig zijn opgevolgd, is het ingebrachte condoom niet te voelen. Ook de partner zal er tijdens de gemeenschap niets van voelen.

FEMIDOM voelt stevig aan. Leidt dit tot vermindering van gevoeligheid tijdens het vrijen?

Nee. Zodra FEMIDOM is ingebracht, neemt het direct de temperatuur van het lichaam aan. Het voelt dan warm en zacht aan zodat gevoeligheid gegarandeerd blijft.

Kan FEMIDOM scheuren tijdens gebruik?

Uitgebreid onderzoek heeft uitgewezen dat het zéér onwaarschijnlijk is dat FEMIDOM tijdens gebruik scheurt. Wees voorzichtig met scherpe nagels en ringen die FEMIDOM kunnen beschadigen. Een beschadigd vrouwencondoom dient te worden vervangen.

Is FEMIDOM te lang, te kort of te wijd?

Nee. Het vrouwencondoom is uiterst zorgvuldig ontworpen en is geschikt voor iedere vrouw. FEMIDOM bedekt de binnenzijde van de vagina, zodat de penis vrij in en uit de beschermde vagina kan bewegen.

Waar is FEMIDOM van gemaakt?

FEMIDOM is gemaakt van polyurethaan; een zacht, maar zeer sterk materiaal. Polyurethaan is hypo-allergeen en neemt snel de lichaamstemperatuur aan

Ik ben nu nog aan de pil. Wanneer kan ik FEMIDOM gaan gebruiken?


Normaal gesproken wordt door huisartsen aangeraden een pillenstrip helemaal af te maken. Voor de laatste pil kun je FEMIDOM al gebruiken om er volledig vertrouwd mee te raken.

Kan ik FEMIDOM voor een tweede maal gebruiken?

FEMIDOM is uitgebreid getest op éénmalig gebruik. Het vrouwencondoom kan niet voor een tweede keer worden gebruikt. Neem voor het vrijen steeds een nieuw condoom.

Gebruik van Femidom

Het gebruik van Femidom is eenvoudig. Iedere verpakking bevat een gebruiksaanwijzing in 7 talen, lees deze goed door. Controleer altijd de vervaldatum.

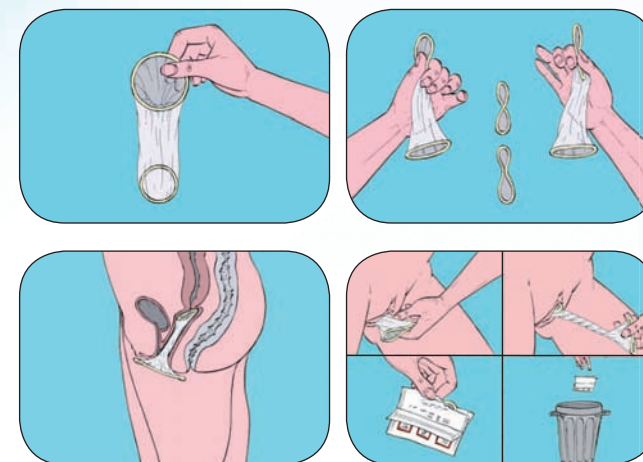

VOOR het vrijen

1. Inbrengen. Knijp de kleine binnenring samen en duw hem diep in de vagina.
2. Verder inbrengen. Duw de ring nog dieper naar binnen met een vinger in het condoom.
3. Bedekken. Laat de grote buitenring de schaamlippen bedekken.

TIJDENS het vrijen

4. Begeleiden. Leid de penis het condoom in

NA het vrijen

5. Dichtdraaien. Draai de buitenste ring een slag zodat het sperma niet uit het condoom loopt.
6. Verwijderen. Verwijder het vrouwencondoom door het voorzichtig uit de vagina te trekken. Let erop dat er geen sperma uitloopt.